

Checkliste für THERA PRAX® MOBILE

	Rimowa-Koffer groß
	Rimowa-Koffer klein

THERA PRAX® MOBILE Monitor

	THERA PRAX® MOBILE Monitor
	Netzteil
	Netzkabel
	Tastatur (evtl. mit USB-Adapter)
	Maus (evtl. mit USB-Adapter)

THERA PRAX® MOBILE Trainer

	THERA PRAX® MOBILE Trainer
	Verbindungskabel Monitor-Trainer

THERA PRAX® MOBILE Verstärker

	THERA PRAX® MOBILE Verstärker
	Akku ( ggf. im Verstärker)
	Ladegerät mit/ohne Netzkabel

Zubehör

	Biofeedback-Sensoren
	Medizinproduktebuch
	Sonstiges:

## Rimowa-Koffer

Den Rimowa-Koffer gibt es in einer kleinen und einer großen Ausführung.

In der kleinen Ausführung darf nur der THERA **PRAX**<sup>®</sup> MOBILE Trainer und das Verbindungskabel Monitor-Trainer verpackt werden. In der großen Ausführung können alle weiteren Komponenten verpackt werden.

Eine detaillierte Anleitung, wie die einzelnen Komponenten im Koffer zu verpacken sind, befindet sich im Handbuch Kapitel Transportverpackung.

Rimowa-Koffer groß



Rimowa-Koffer klein



## THERA **PRAX**<sup>®</sup> MOBILE

### **Monitor**



### **Achtung!**

Unterschied zum Trainer: Schwarzer Lüfter an der Rückseite

## Stromversorgung

Die Stromversorgung setzt sich aus dem Netzteil und dem Netzkabel zusammen. Beides bitte beilegen.

Netzteil



Netzkabel (3-pin)



## Tastatur und Maus

Wenn vorhanden, USB-Adapter für den PS2-Anschluss bitte mit beilegen.

Tastatur



Maus



## Verbindungskabel Monitor-Trainer



## Verstärker 13-/17-Kanal

Der 13-/17-kanalige Verstärker setzt sich aus dem THERA **PRAX**<sup>®</sup> MOBILE Verstärker mit optischen Anschlüssen, dem Ansmann-Ladegerät mit Netzkabel und den Akkus zusammen.

Vor dem Verschicken bitte kontrollieren, ob sich Akkus im Batteriefach befinden.

Verstärker 13-Kanal



Akkus im Batteriefach



Bitte denken Sie je nach Absprache daran, die Biofeedback-Sensoren beizulegen.

Ladegerät



zugehöriges Netzkabel (2-pin)

